

PRUEBA DE TIPO DE SANGRE PARA FELINOS

Descripción del kit

La prueba del tipo de sangre felina, se basa en la reacción de aglutinación y está destinada a clasificar la sangre de los gatos.


Componentes del kit

Componentes	Caja 5 kits	Caja 10 kits
Bolsas de plástico, cada una con un kit de determinación del grupo sanguíneo, varillas y desecante.	5	10
Buffer	1	2
Goteros	5	10
Tarjeta de tipificación de sangre	5	10
manual de instrucciones	1	1


Procedimiento de la Prueba




Recoger 0,5 mL de sangre. (use tubo con EDTA o anticoagulantes)

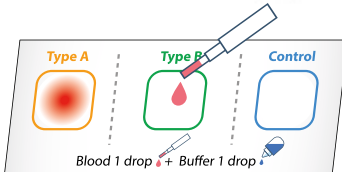


Ponga una gota de sangre (20-30 uL) en cada pocillo de la tarjeta

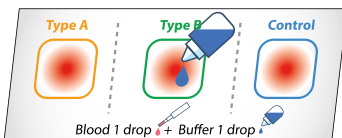

Ponga una gota de solución buffer (20-30 uL) en cada pocillo

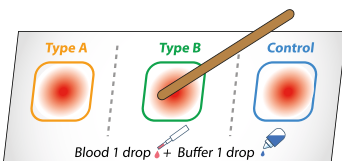

Mezcle con una varilla durante 15 segundos (use una varilla diferente en cada pocillo)

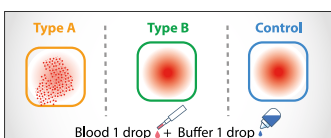

Examina la aglutinación y realizar lectura en 2 minutos



Resultados de la Prueba

Tipo A			Tipo B		
Type A	Type B	Control	Type A	Type B	Control
Aglutinación en el pocillo A			Aglutinación en el pocillo B		
Tipo AB			Falso (+)		
Type A	Type B	Control	Type A	Type B	Control
Aglutinación en el pocillo A y B			Aglutinación en el pocillo de Control		

Falso (+): sangre mal acondicionada o enfermedad hemolítica autoinmunitaria

Almacenamiento y expiración de la prueba

Sin abrir: conservar en una habitación a temperatura 2 - 30°C / Humedad 20 - 80%. Tiempo de expiración desde su fabricación: 12 meses.

Abierta: se recomienda utilizar inmediatamente.

Importado y distribuido exclusivamente por:

BIOADVANCE CENTROAMERICA S.A.

Teléfono: +506 8730 7910

E-mail: info@bioadvance.life

www.bioadvance.life

Santa Ana, Costa Rica, 10903.